

stimah

Manual de Uso



adoxy
MEDICAL

Bem-vindo ao

Manual de Uso do Manípulo Íntimo STIMAH

ADOXY – STIMAH

Direitos autorais © 2023 Adoxy - Versão 00

Produto:	STIMAH
Nome Técnico:	MANÍPULO ÍNTIMO INTERNO
Compatível:	PERFECTION MODE
Notificação Anvisa N°:	82149139001
Fabricante:	ADOXY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA www.adoxy.com.br • (15) 3243-0021

Direitos Autorais © 2023 Adoxy.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou copiada em nenhum tipo de mídia, impressa ou digital, sem a permissão formalizada da Adoxy.



**ATENÇÃO! VERIFIQUE SE O MANÍPULO RECEBIDO CONDIZ
COM O NOME E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTES MANUAIS.**

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1: CONHECENDO O STIMAH	1
1.1 O QUE É O STIMAH E SEU MECANISMO DE AÇÃO?	2
1.2 RADIOFREQUÊNCIA PARA FINS TERAPÊUTICOS	2
1.3 PÚBLICO ALVO	2
1.4 INDICAÇÕES CLÍNICAS	3
1.5 CONTRAINDICAÇÕES	3
1.6 REAÇÕES AO TRATAMENTO E EFEITOS COLATERAIS	4
1.7 RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS	4
1.8 CONFERINDO SEU PRODUTO	4
1.9 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO STIMAH	5
1.10 SIMBOLOGIA NO MANÍPULO	6
1.11 SIMBOLOGIA NO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO	6
1.12 ETIQUETA	8
1.13 CONECTANDO O MANÍPULO STIMAH	8
CAPÍTULO 2: MODO DE USO	9
2.1 PARAMETRIZAÇÃO E INÍCIO DA TERAPIA NO PERFECTION MODE	9
2.2 PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO	10
CAPÍTULO 3: LIMPEZA E DESCARTE	11
3.1 LIMPEZA	11
3.2 DESCARTE	11
CAPÍTULO 4: REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	12


CAPÍTULO 1: CONHECENDO O STIMAH

Parabéns por ter adquirido o nosso manípulo STIMAH!

Ele é fornecido com este manual de uso e o mesmo deve sempre estar disponível à equipe técnica responsável pela operação. Contendo informações imprescindíveis para sua utilização.

O seu uso não substitui o treinamento profissional oferecido pela Adoxy. O treinamento é dado junto ao do equipamento Perfection Mode, no qual é utilizado o manípulo STIMAH. A leitura deste manual não credencia nenhum profissional a realizar procedimentos de radiofrequência.

Para solicitação do manual de uso em formato impresso e sem custo adicional, informações ou quaisquer dúvidas consulte os canais de atendimento Adoxy, disponíveis pelo nosso website www.adoxy.com.br ou pelo telefone (15) 3243-0021.

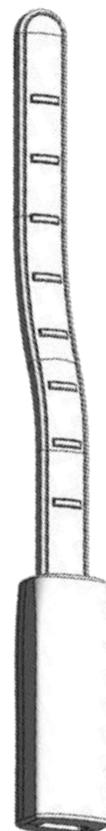

1.1 O QUE É O STIMAH E SEU MECANISMO DE AÇÃO?

O manípulo íntimo STIMAH é uma tecnologia que através da emissão de radiofrequência traz um tratamento moderno para a regeneração genital, de forma não cirúrgica, personalizada e segura que atende às necessidades femininas e traz benefícios à saúde sexual, bem-estar e qualidade de vida. A radiofrequência é extremamente benéfica à saúde sexual e íntima. Mudanças como gestações, partos, fatores hormonais, envelhecimento e outros com ênfase para o uso da radiofrequência para regenerar e/ ou restaurar a funcionalidade geniturinária, função sexual e qualidade de vida das mulheres. Para sua utilização use gel a base d'água ou lubrificante. Não é necessário o uso de preservativo, por ser um manípulo descartável. Para o tratamento não será necessário a aplicação de anestesia (Pires, 2021).

1.2 RADIOFREQUÊNCIA PARA FINS TERAPÊUTICOS

A radioterapia utiliza radiações do espectro eletromagnético na ordem quilohertz (KHz) e mega (MHz) para os tratamentos médicos e estéticos, também, é conhecida por ser uma energia utilizada em rádio transmissões. Esse tipo de tecnologia quando aplicada em procedimentos estéticos não produz efeitos neuromusculares intensos e nem eletroquímicos significativos, pois trata-se de uma energia transmitida em forma de ondas com alternância cíclicas de polaridade e frequência. Contudo, provoca efeitos de aquecimento pela conversão ou absorção dessa energia pelos tecidos, chamado de diatermia e é muito utilizado há anos como termoterapia profunda. A produção de calor se dá por meio das ondas eletromagnéticas de radiofrequência que atravessam os eletrodos e chegam aos tecidos que produzem aumento de temperatura de acordo com a Lei de Joule. Esta lei diz que quanto maior a corrente elétrica através de uma carga resistiva (tecido), maior a produção térmica (Agne, 2004; Soriano, Pérez e Basques, 2000).

1.3 PÚBLICO ALVO

O manípulo STIMAH é utilizado em conjunto com o equipamento Perfection Mode e é de uso destinados ao público adulto. O profissional operador deve avaliar se o paciente está apto a realizar o tratamento, respeitando todas as contraindicações

citadas neste manual, inclusive também o relato do paciente sobre o seu estado de saúde.



O profissional deve sempre fazer uma anamnese do paciente e antes de cada sessão verificar o estado de saúde do paciente.



Um paciente que apresente qualquer uma das contraindicações listadas, não deverá ser submetido a qualquer tratamento de radiofrequência sem avaliação médica especializada, indicando que os benefícios relacionados à realização do tratamento sobrepujam os riscos de sua realização e mediante, assim, a prescrição médica.

1.4 INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Atrofia vaginal;
- Incontinência urinária (IU);
- Ressecamento ou secura vaginal;
- Sensibilidade reduzida;
- Dispareunia (dor na relação sexual);
- Síndrome Geniturinária da Menopausa (SGM);
- Incontinência fecal leve;
- Melhora na lubrificação da região íntima.

1.5 CONTRAINDICAÇÕES

- Alteração de sensibilidade local;
- Gestante (operador e paciente);
- Lesões e infecções locais;
- Infecções genitais ativas (ex: Herpes e HPV);
- Dispositivo intrauterino (DIU);
- Portadores de marcapasso cardíaco, implantes metálicos e eletromagnéticos;
- Câncer local e metástases;
- Infecções sistêmicas;
- Pós operatório imediato.

1.6 REAÇÕES AO TRATAMENTO E EFEITOS COLATERAIS

As reações ao tratamento serão de uma leve ardência durante a aplicação, (no caso de a paciente ter a região vaginal ressecada), mas ao longo das sessões do tratamento a região começa a gerar lubrificação, não causando mais esse desconforto. Durante o tratamento o paciente sente um aquecimento local, ou seja, um calor. Em alguns pacientes é possível que ocorra uma leve secreção avermelhada após o tratamento, podendo durar de 1 a 2 dias.

1.7 RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS

O uso de tecnologias eletromédicas como o STIMAH é de uso restrito aos profissionais da área da saúde. Estes profissionais, devidamente habilitados e capacitados, serão os responsáveis pelo manuseio, aplicação, resultados e quaisquer intercorrências do tratamento. A Adoxy não faz representações referentes as leis e regulamentações existentes no país que possam se aplicar ao uso de qualquer equipamento eletromédico. Os profissionais que farão uso da tecnologia assumem total e pleno compromisso em comunicar as agências reguladoras locais para determinar qualquer habilitação, autorização e credencial, requerida por lei para o uso clínico e operacional deste equipamento.

Para utilizar o manípulo, é necessário que o operador tenha recebido o treinamento oferecido pela Adoxy ou sobre orientação do profissional que o realizou.

1.8 CONFERINDO SEU PRODUTO

Código	Descrição	Quantidade	Foto
30220	KIT INICIAL		
-	Manípulo Íntimo (STIMAH)	10	
-	Cabo de conexão do manípulo íntimo com o equipamento	02*	

* Serão enviados à você dois cabos em sua primeira compra, um para uso e um para backup, para que você não interrompa seu tratamento por problemas técnicos.


Código	Descrição	Quantidade	Foto
30221	KIT DE REPOSIÇÃO		
-	Manípulo Íntimo (STIMAH)	10	

Código	Descrição	Quantidade	Foto
30134	Cabo de conexão do manípulo íntimo com o equipamento	01	

1.9 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO STIMAH

Emissão	Radiofrequência.
Dimensões da parte que será introduzida (A*L*P)	15,5 x 1,4 x 0,8 cm
Comprimento do cabo de conexão do manípulo íntimo com o equipamento	2,0 m
Dimensão total do manípulo íntimo (A*L*P)	22 x 2 x 2 cm
Grau de proteção contra choque elétrica parte aplicada	Tipo B
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPX0

1.10 SIMBOLOGIA NO MANÍPULO E EMBALAGEM

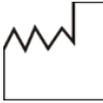	Equipamento com parte aplicada tipo B		Não reutilizar
	Data de fabricação		Símbolo geral de advertência
	Fabricante		Símbolo de advertência
	Manual do operador		Referência no manual de instrução
	Manter seco		Límites de Temperatura
	Manter afastado de luz solar		Número de série

1.11 SIMBOLOGIA NO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO

	Botão iniciar (play).
	Botão cancelar (cancel).
	Botão limpar (reset).
   <p>Monopolar Bipolar Tripolar</p>	Botões de seleção de manípulo.

 <p>ABDÔMEN BRAÇOS NÁDEGA</p> <p>FACE PERNAS</p>	<p>Botão de seleção da região a ser tratada.</p>
	<p>Botões de ajustes.</p>
	<p>Botão de retorno.</p>
	<p>Indicador de potência de RF escolhida.</p>
	<p>Indicador de tempo total escolhido do tratamento (0 a 40 min).</p>
	<p>Indicador de resfriamento, indica se está ligado (ON) ou desligado (OFF).</p>
	<p>CONTADOR PARCIAL: indica o tempo corrido com pedal acionado.</p>
	<p>CONTADOR TOTAL: indica o tempo acumulado de tratamento.</p>

1.12 ETIQUETA

1	Etiquetas de informações fixada no manípulo	
---	---	--

1.13 CONECTANDO O MANÍPULO STIMAH

Para utilização do STIMAH no equipamento Perfection Mode conecte no local indicado.



- Insira o conector do manípulo no conector do equipamento.
- O conector tem guias que auxiliam no encaixe correto, portanto não force sua entrada.
- Gire o conector até que os guias estejam alinhados e o manípulo encaixará sem esforço.
- Após o encaixe, gire o anel com rosca até travar.
- Não é preciso apertar com força.

Ao conectar o acessório, certifique-se de que o cabo AC e o pedal estão livres, em uma área onde não há circulação de pessoas, onde não possa ser pisoteado e onde nenhum outro equipamento ou móvel fique sobre eles. Sempre ter extremo cuidado ao manusear o manípulo.

CAPÍTULO 2: **MODO DE USO**

Neste capítulo você conhecerá as telas e os comandos referentes aos comandos do equipamento compatíveis com o manípulo STIMAH.

O software é intuitivo, amigável e de fácil parametrização.



Siga as instruções do manual de uso do Perfection Mode.



O manual de uso do Perfection Mode contém mais informações sobre o software, manípulos, equipamento e parametrizações, é importante fazer a leitura do mesmo antes de utilizar o manípulo Stimah.

2.1 PARAMETRIZAÇÃO E INÍCIO DA TERAPIA NO PERFECTION MODE

Para iniciar a parametrização e o terapia com o manípulo STIMAH, selecionar o botão início.



Em seguida, a tela com o menu principal irá aparecer.

Nessa tela é possível escolher o manípulo, neste caso, selecionar o modo tripolar para iniciar o tratamento.



Atenção: O manípulo íntimo deve ser utilizado no modo no tripolar

A tela do modo tripolar irá aparecer, nela é possível escolher a região do corpo em que a terapia será aplicada. Para o utilizar o manípulo STIMAH basta escolher face.



Posteriormente a seleção da região, a tela de parametrização da terapia irá aparecer.

Após parametrização, selecionar o botão play e acionar o pedal para iniciar a terapia.

Siga a indicação abaixo de parametrização para início do tratamento do STIMAH no equipamento Perfection Mode.



2.2 PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO

4 – 11%
5 minutos em cada parede
(Pontos de referência): 1h, 5h, 7h e 11h.
4 sessões a cada 14 dias
Posição ginecológica
Observar relato do paciente.



Em caso de emergência acionar a botoeira de emergência no equipamento.



Para maiores informações consultar o manual do Perfection Mode. Haverá risco de intercorrência se o profissional não mantiver diálogo com o paciente a fim de identificar qualquer desconforto durante a aplicação. Em caso de qualquer desconforto relatado, pause o tratamento e verifique se os parâmetros aplicados estão adequados para aquele paciente.

CAPÍTULO 3: LIMPEZA E DESCARTE

3.1 LIMPEZA

O manípulo STIMAH deve ser higienizado antes do uso e descartado após, pois é de uso único. Para o descarte ver item 3.2.

O cabo de conexão do manípulo com o equipamento deve ser limpo a cada sessão de terapia.

Para a limpeza do manípulo e do cabo de conexão deve usar um pano macio, sem que esteja soltando fios e borrifar um pouco de álcool 70% ou digluconato de clorexidina 0,5%. Passar o pano sobre a superfície do cabo.



Jamais tente fazer qualquer reparo no manípulo sob risco de choque elétrico.



Os manípulos não são autoclaváveis.

3.2 DESCARTE

Os resíduos deste manípulo, quando descartados de maneira inadequada, podem acarretar riscos ao meio ambiente. Em contato com o solo, contaminam os lençóis freáticos e quando queimados, poluem o ar.

O descarte do manípulo deve ser realizado conforme as regulamentações do país onde o equipamento se encontra. No Brasil, para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do manípulo, quando o mesmo for inutilizado, estes devem ser descartados (conforme legislação vigente e regime da vigilância sanitária) em local apropriado, pois os materiais existentes podem contaminar o meio ambiente.



Esse manípulo não deve ser eliminado como lixo doméstico.

CAPÍTULO 4: REFERÊNCIA

BIBLIOGRÁFICA

Agne, J. E. Eletrotermoterapia teoria e prática. Santa Maria: Orium, 2004.

Pires, A. L.R, Ginecologia Regenerativa, São Paulo, 2021.

Soriano, M. C. D., Perez, S. C., Baques, M. I. C. Electroestética profesional aplicada: teoria, y práctica para la utilización de corrientes en estética. Madrid: Sorisa, 2000.

adoxy